


Uwaga!!!

Opaska uciskowa dostarczana jest w pozycji transportowej.

Aby przygotować ją do zastosowania, należy złożyć opaskę do pozycji roboczej.

Instrukcja obsługi

PRZYGOTOWANIE KONFIGURACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ SZYBKIE ZASTOSOWANIE

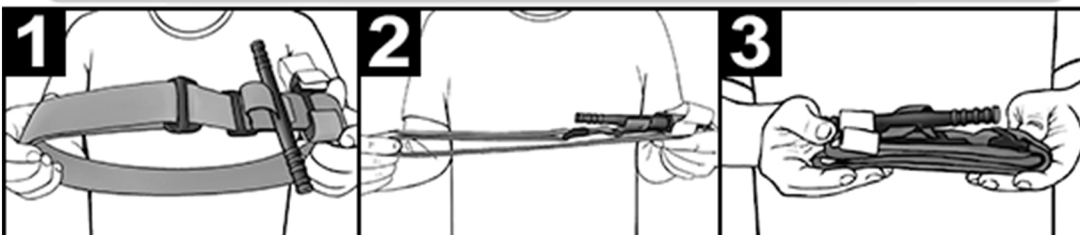

Wyciągnąć opaskę z opakowania i rozłożyć. Umieścić końcówkę taśmy opaski w otworze sprzączki. Przewlec ok. 20 cm, zgąć i przymocować do taśmy.

Trzymając jedną ręką koniec opaski wraz z taśmą, na której jest zamocowana, włożyć palec drugiej ręki w uformowaną pętelkę i rozciągnąć, aż utworzy się płaska struktura i zabezpieczyć.

Złożyć opaskę na pół umieszczając klamrę tak, aby znalazła się na jej zewnętrznej powierzchni i zamocować. Twardy koniec powinien wystawać 5-10 mm z uformowanej konstrukcji.

Uwaga!!!

Przed założeniem opaski należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Niewłaściwe użycie może spowodować zwiększenie krwawienia i utratę kończyn. Opaskę uciskową należy używać wyłącznie w przypadku natychmiastowej pomocy medycznej i tymczasowego zatrzymania masywnego (krytycznego) krwawienia z kończyn górnych i dolnych. Założenie opaski uciskowej to ostateczność. Opaskę uciskową można zastosować jedynie wtedy, gdy krwawienia nie można zatamować w inny sposób, a sytuacja zagraża życiu. Maksymalny czas zastosowania założonej opaski uciskowej na kończynie wynosi 2 godziny, ale może być krótszy w zależności od stanu fizycznego ciała pacjenta, temperatury powietrza i innych czynników zewnętrznych. Zabronione jest samodzielne przestawianie opaski uciskowej, zastępowanie jej innym środkiem tamującym krwawienie, jeżeli czas trwania założonej opaski uciskowej utrzymuje się na kończynie dłużej niż 2 godziny. Opaskę należy przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Producent gwarantuje zgodność produktu z wymaganiami określonymi w dokumentach regulacyjnych, pod warunkiem przestrzegania przez użytkownika zasad określonych w instrukcji obsługi oraz warunków przechowywania i transportu.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku jednorazowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z instrukcją użytkownika.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tarnopolskie Centrum Naukowo-Techniczne „ENVOS”, 15 kwietnia, budynek 6a, biuro 51, Tarnopol, 46023, Ukraina, +38(097)7299877, www.cpac.com.ua

MPRM Piotr Wiaderny Luszczow
Pierwszy 165, 20-258 Lublin, Poland, info@mprm.pl

Opaski uciskowe
TU U 32.5-21166302-003:2015


pt UA153325




MADE IN UKRAINE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zakładanie opaski uciskowej przy użyciu obu rąk

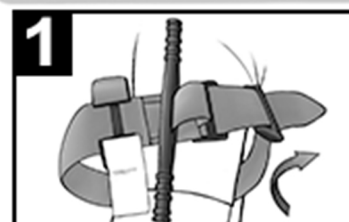


Opaskę uciskową w rozłożonej formie owinać wokół uszkodzonej kończyny. Przeciągnąć koniec taśmy przez otwór klamry. Umieścić opaskę uciskową 5-7 cm powyżej miejsca krwawienia. Jeśli rana nie jest widoczna, założyć opaskę uciskową na uszkodzoną kończynę tak wysoko, jak to możliwe.

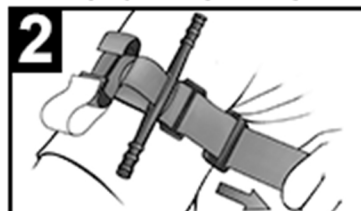

Pociągnąć taśmę opaski bardzo mocno, tak by przylegała ściśle do kończyny. Zamocować taśmę wokół kończyny. Opaska uciskowa powinna być tak ciasna, aby końcówki trzech palców nie mogły być wsunięte między taśmę a kończynę. Jeśli jest to możliwe, należy docisnąć opaskę i zamocować ponownie.



Przekręcać krepulec do momentu, aż upływ krwi zostanie zatamowany, a tętno obwodowe nie będzie wyczuwalne.

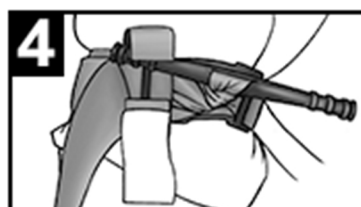


Umieścić krepulec w klipsie mocującym. Sprawdzić, czy nadal występuje krwawienie i wyczuwalne jest tętno na obwodzie. Jeśli rana nadal krwawi lub wyczuwalne jest tętno obwodowe, należy rozważyć mocniejsze jej zaciśnięcie lub założenie kolejnej opaski tuż nad pierwszą. Sprawdzić krwawienie i tętno.



Umieścić taśmę opaski między klipsami nad krepulcem. Zabezpieczyć krepulec i taśmę białym paskiem zabezpieczającym i dokonać oznaczenia czasu założenia opaski. Przygotować pacjenta do transportu.

Zakładanie opaski uciskowej jedną ręką

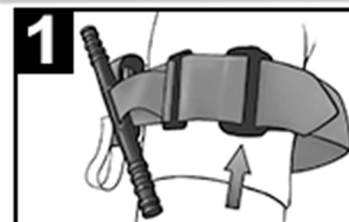

LUB

Umieścić na uszkodzonej kończynie pętlę opaski uciskowej utworzoną przez taśmę. Umieścić opaskę uciskową 5-7 cm powyżej miejsca krwawienia. Jeśli rana nie jest widoczna, założyć opaskę uciskową na uszkodzoną kończynę tak wysoko, jak to możliwe.

+38 (097) 729 98 77

MADE IN UKRAINE

www.cpac.com.ua